

SpillEx

Super imukykyinen. Erittäin turvallinen.



Tuotekuvaus

SpillEx-imeytyspyyhe on erittäin imukykyinen kertakäyttöpyyhe. Se on suunniteltu haitallisen nesteen poistamiseen pinnoilta.

SpillEx koostuu kolmesta materiaalikerroksesta:

- ✓ Hydrofiilinen kuitukangas, joka imee kosteuden ja siirtää sen pyyhkeen sisämaateriaaliin.
- ✓ Keskimmäinen kerros sisältää erittäin imukykyistä polymeeriä, joka joutuessaan kosketuksiin nesteen kanssa muuttaa sen geelimäiseksi aineeksi jolloin neste ei valu pois pyyhkeen sisältä.
- ✓ Pintakerros on PE-kalvo, joka estää sisällä olevan nesteen pääsemästä läpi ja näin ollen pyyhettä voidaan käsitellä turvallisesti.

SpillEx-pyyhkeen maksimikapasiteetti imeä kosteutta pinnalta riippuu nesteen laadusta. Oikein käytettynä yksi pyyhe imee pinnalta noin 1200 ml vesijohtovettä ja noin 500 ml eritettä.

Käyttöalue

SpillEx-imeytyspyyhettä voidaan käyttää esim. leikkaussalissa eritteiden poistamiseen tai vaikkapa vanhustenhuollossa ja päiväkodeissa virtsavahinkoihin ja kaatuneisiin ruokajuomiin. Ravintoloissa ja elintarvikeliikkeissä juomien kaatuessa lattialle nesteen saa poistettua nopeasti ja turvallisesti. Eri teollisuuden tuotantotiloissa SpillEx toimii hyvin monenlaisten vesipohjaisten vuotojen kuivaamisessa. Paras tulos saadaan kovilta pinnoilta.

Edut käytössä

- ✓ **Korkea imukyky:** Oikein käytettynä yksi pyyhe imee pinnalta noin 1200 ml vesijohtovettä ja 500 ml eritettä.
- ✓ **Kosteus pysyy pyyhkeessä:** Imeytynyt neste muuntautuu pyyhkeessä geelimäiseksi ja estää nesteen poistumisen pyyhkeestä.
- ✓ **Hygienia:** Pyyhkeen päällimmäisen PE-kalvon ansiosta pyyhettä voidaan käsitellä turvallisesti.

Käyttöohje

1. Aseta SpillEx-imeytyspyyhe nestevahingon päälle printattu PE-kalvo ylöspäin.
2. Odota! Tarvittava imeytysaika riippuu kyseessä olevasta nesteestä, tavallinen odotusaika on noin 30 s – 2 min.

Vinkki: Jos neste on osittain kuivunut pinnalle, voidaan kuivuneeseen osaan lisätä suihkuttamalla vettä ja imeyttää vahinko sitten.

Suurissa nestevahingoissa pyyhettä voidaan siirtää aina uuteen kohtaan nostamatta sitä pinnalta.

3. Nosta SpillEx pinnalta tarttumalla printattuun kalvopintaan. Käytetty imeytyspyyhe voidaan hävittää energijätteenä tai tavallisen sekajätteen mukana.

Kontaminoituneen nesteen kohdalla on huomioitava mahdolliset varotoimenpiteet käsittelyn ja hävittämisen osalta.

Tuotenumero	Tuote	Koko (cm)	Kpl/pkt	Pkt/ltk
146760	SpillEx	51 x 37	20	10