

Käyttöohje Hengityssuojain Weini K-220V FFP2 NR / Weini E-340V FFP3 NR

Sovitusohjeet

Ennen sovitus varmista, että kätesi ovat puhtaat.

Käyttäjän parran tulee olla ajettu ennen suojaimen käyttöä. Hengityssuojaimia ei pitäisi käyttää sängen, parran tai muun kasvojen karvoituksen kanssa, koska ne voivat estää riittävän tiiviyn.

Kaikki hengityssuojaimen osat tulee tarkastaa vaurioiden varalta ennen käyttöä.

1. Ota suojain toiseen käteen avonainen puoli kasvoja kohti. Tartu toisella kädellä molempiin nauhoihin.
2. Pidä hengityksensuojainta leukasi alapuolella nenäpuristin ylöspäin ja vedä nauhat pääsi yli. Aseta ylänauha päälleen ympäri. Aseta alannauha korvien alapuolelle. Nauhat eivät saa jäädä kierteelle.
3. Varmista hyvä istuvuus ja asianmukainen tiiviys muokkaamalla molempien käsien avulla nenäkappaletta nenän muodolle sopivaksi. Jos puristat nenäkappaleen vain yhdellä kädellä, hengityksensuojaimen teho saattaa jäädä heikommaksi.
4. Hengityssuojaimen kasvotiivisteiden tiiviys ja istuvuus tulisi tarkistaa ennen työpaikalle menemistä.



Tiiviiden tarkistamistoimet

1. Tarkasta tiiviys peittämällä hengityksensuojain edestä molemmin käsin varoen liikuttamasta suojainta, jotta sen tiiviys ei kärsi.
- 2a. VENTTIILITÖN hengityssuojain – HENGITÄ ULOSPÄIN terävästi
- 2b. ULOSHENGITYSVENTTIILILLÄ varustettu hengityssuojain – HENGITÄ SISÄÄNPÄIN terävästi.
3. Jos nenän kohdalla esiintyy ilmavuotoa, korjaa nenäpuristimen asentoa tiiviiden saavuttamiseksi. Toista edellä kuvattu tiiviiden tarkistus.
4. Mikäli ilmaa vuotaa hengityssuojaimen reunoilta, säädä nauhojen kireyttä poistaaksesi vuodon. Toista tiiviystesti. Jos ET pysty saavuttamaan riittävää tiiviyyttä, ÄLÄ mene epäpuhtauksia sisältävälle alueelle. Ilmoita esimiehellesi.

Varoitukset ja rajoitukset

Tämä tuote on kertakäyttöinen, vaihda tarvittaessa.

Älä muuta, puhdista tai korjaa suojainta.

Ennen käyttöä varmista, että tuotteen päiväys on voimassa.

Älä käytä tuotetta uudelleen, tuote on vain yhden henkilön käyttöön.

Vaihda suojain, jos se on vahingoittunut, hengitysvastus on liian suuri tai vuoron päätteeksi.

Ennen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti.

Säilytys

Säilytyslämpötila: -20°C – +25°C

Säilytys alle 80% kosteudessa

Älä säilytä suorassa auringonvalossa.

Suojausluokitus

FFP1: Suodatustehokkuus on yli 80%

FFP2: Suodatustehokkuus on yli 94%

FFP3: Suodatustehokkuus on yli 99%

Ilmoitettu laitos

BSI Group (NB 2797) John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Alankomaat

Bruksanvisning Andningsmask Weini K-220V FFP2 NR / Weini E-340V FFP3 NR

Instruktioner

Säkerställ att dina händer är rena innan påtagning av andningsskydd.

Användarens skägg bör vara klippt innan andningsskyddet tas i bruk, Andningsskydd ska inte användas om man har skägg, skäggstubb eller annan ansiktsbehåring, eftersom detta kan medföra att skyddet inte sluter tätt mot ansiktet.

Alla andningsskydd bör granskas för eventuella fel innan ibruktagande.

1. Håll skyddet i ena handen med den öppna sidan mot ansiktet. Greppa bägge banden med den andra handen.
2. Håll andningsskyddet under hakan med näsbygeln uppåt. Dra bägge banden över huvudet. Placera det övre bandet på hjässan och det nedre bandet under öronen. Banden får inte vridas.
3. Försäkra dig om en god passform och att skyddet sluter tätt mot ansiktet genom att med båda händerna anpassa näsbygeln för att passa näsan. Ifall endast ena handen används finns risk för att effekten blir reducerad.
4. Tätheten och anpassningen mot ansiktet bör kontrolleras innan jobb på plats som kräver andningsskydd påbörjas.



Kontroll av täthet

1. Kontrollera tätheten genom att hålla i skyddet med båda händerna försiktigt så att tätheten inte lider.
 - 2a. Andningsskydd UTAN VENTIL- andas UT kraftigt
 - 2b. Andningsskydd MED VENTIL- andas IN kraftigt
 3. Om det uppstår läckage kring näsan, justera näsbygeln för att göra skyddet tätt. Upprepa kontrollen.
 4. Ifall läckage kring skyddet uppstår, justera banden för att göra skyddet tätt. Upprepa kontrollen.
- Ifall skyddet INTE går att få tätt, gå INTE in på en plats där skydd krävs. Kontakta din förman.

Varningar och begränsningar

Detta är en engångsprodukt, byt ut den vid behov.

Modifiera, rengör eller reparera inte skyddet.

Försäkra dig om att bäst-före datumet inte gått ut innan användning.

Återanvänd inte skyddet. Produkten är ämnad endast för en person.

Byt ut skyddet ifall det är skadat, andningsmotståndet är för stort eller i slutet av varje skift.

Läs instruktionerna noga innan användning.

Förvaring

Förvaringstemperatur: -20°C – +25°C

Förvaring under 80% relativ fuktighet

Förvaras inte i direkt solljus

Skyddsklass

FFP1: Filtreringseffektivitet över 80%

FFP2: Filtreringseffektivitet över 94%

FFP3: Filtreringseffektivitet över 99%

Anläggning

BSI Group (NB 2797) John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederländerna